

# Sistema MRI Ready di Abbott:

## lista di controllo per il medico prima della scansione RMN

Paziente: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

### Informazioni sul dispositivo:

Pacemaker: Ditta produttrice: \_\_\_\_\_ Prodotto: \_\_\_\_\_ Codice: \_\_\_\_\_

ICD: Ditta produttrice: \_\_\_\_\_ Prodotto: \_\_\_\_\_ Codice: \_\_\_\_\_

### Informazioni sull'elettrocatterere:

RA:  sì  no | Ditta produttrice: \_\_\_\_\_ Prodotto: \_\_\_\_\_ Codice/Lunghezza: \_\_\_\_\_

VD:  sì  no | Ditta produttrice: \_\_\_\_\_ Prodotto: \_\_\_\_\_ Codice/Lunghezza: \_\_\_\_\_

VS:  sì  no | Ditta produttrice: \_\_\_\_\_ Prodotto: \_\_\_\_\_ Codice/Lunghezza: \_\_\_\_\_

## FASI PER LA SCANSIONE RMN<sup>a</sup> REPARTO DI CARDIOLOGIA

Fare riferimento al manuale per i sistemi MRI Ready di Abbott all'indirizzo <https://manuals.sjm.com>

CONDIZIONI DEL SISTEMA RMN	SÌ	NO
Il paziente ha un sistema MRI Ready completo con generatore di impulsi ed elettrocattereri a compatibilità RMN condizionata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha confermato l'assenza di prolunghe, adattatori per elettrocattereri ed elettrocattereri rotti o abbandonati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le misurazioni dell'impedenza dell'elettrocatterere rientrano nei limiti di impedenza programmati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il generatore di impulsi è impiantato nella regione pettorale sinistra o destra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il generatore di impulsi ha una batteria sufficiente (non al termine della sua vita utile, EOL).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPOSTAZIONI DEI DISPOSITIVI PRE SCANSIONE RMN	SÌ	NO
Conferma che le soglie di cattura del paziente sono stabili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soglia di cattura confermata $\leq 2,5$ V con ampiezza di impulso di 0,5 ms per gli elettrocattereri AD e VD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soglia di cattura confermata di $\leq 2,0$ V con ampiezza di impulso di 0,5 ms per l'elettrocatterere VS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conferma dello stato delle impostazioni RMN e della programmazione per la modalità RMN. Selezionare una frequenza di stimolazione per evitare la stimolazione competitiva:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Freq. di stimolazione DOO (bipolare) _____ min <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> Freq. di stimolazione AOO (bipolare) _____ min <sup>-1</sup>		
<input type="checkbox"/> Freq. di stimolazione VOO (bipolare) _____ min <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> Stimolazione OFF (disattivata)		
SOLO per pacemaker: se si utilizza un dispositivo palmare SJM MRI Activator <sup>TM, b</sup> verificare che sia stato abilitato utilizzando il programmatore Merlin <sup>TM</sup> Patient Care System (PCS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampato rapporto di riepilogo RMN delle impostazioni RMN del paziente e dei parametri programmati permanenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPOSTAZIONI DEI DISPOSITIVI POST SCANSIONE RMN	SÌ	NO
Impostazioni RMN del generatore di impulsi disabilitate e ripristino delle impostazioni programmate in modo permanente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conferma che le impostazioni programmate in modo permanente sono appropriate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo delle soglie di cattura di stimolazione dopo la scansione, per assicurare che i parametri di stimolazione siano programmati adeguatamente per il paziente in base alla soglia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questo documento è destinato ad essere utilizzato come guida per le strutture sanitarie.

Nome del medico: \_\_\_\_\_

Firma del medico: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_



## FASI PER LA SCANSIONE RMN<sup>a</sup> REPARTO DI RADIOLOGIA

Fare riferimento al manuale per i sistemi MRI Ready di Abbott all'indirizzo <https://manuals.sjm.com>

CONDIZIONI DI SCANSIONE RMN	SÌ	NO
Il paziente ha un sistema MRI Ready completo con generatore di impulsi ed elettrocatereteri a compatibilità RMN condizionata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conferma dell'assenza di condizioni avverse alla scansione RMN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selezione dei parametri di scansione corretti per l'apparecchiatura RMN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conferma dell'abilitazione delle impostazioni RMN (le impostazioni RMN devono essere abilitate prima della scansione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esecuzione della scansione e monitoraggio del paziente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disabilitazione delle impostazioni RMN del generatore di impulsi. Nota – Se non si utilizza il dispositivo palmare SJM MRI Activator™, le impostazioni RMN devono essere disattivate dal medico, dal clinico o dal rappresentante Abbott che gestisce il dispositivo del paziente, utilizzando il programmatore Merlin™ PCS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SE È UTILIZZATO IL DISPOSITIVO SJM MRI ACTIVATOR <sup>b</sup> (SOLO CON PACEMAKER)	SÌ	NO
Prima di eseguire una scansione, conferma con il cardiologo che il dispositivo palmare SJM MRI Activator™ è stato abilitato utilizzando il programmatore Merlin PCS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica dello stato delle impostazioni RMN mediante il dispositivo portatile SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se le impostazioni RMN non erano state abilitate in precedenza, abilitazione delle impostazioni RMN prima di eseguire la scansione mediante il dispositivo portatile SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Una volta eseguita la scansione RMN del paziente, disabilitazione delle impostazioni RMN mediante il dispositivo portatile SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

### Supporto tecnico

Abbott mette a disposizione linee telefoniche 24 ore su 24 per rispondere a quesiti tecnici e per l'assistenza.

1 818 362 6822

1 800 722 3774 (numero verde in Nord America)

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Abbott di zona.

a. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, comprese avvertenze, precauzioni, controindicazioni e potenziali eventi avversi, consultare il manuale dei sistemi Abbott MRI Ready all'indirizzo <https://manuals.sjm.com/> oppure visitare il sito [www.sjm.com](http://www.sjm.com).

b. Non portare il sistema di programmazione Merlin o il dispositivo palmare SJM MRI Activator nella sala RMN (zona IV) né oltre la linea dei 5 gauss.

Questo documento è destinato ad essere utilizzato come guida per le strutture sanitarie, come definito dall'American College of Radiology.

### Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgio, Tel.: +32 2 774 68 11  
SJM.com

St. Jude Medical è ora Abbott.

**Nota** – Prima di utilizzare questi dispositivi, prendere visione delle Istruzioni per l'uso che riportano l'elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, potenziali eventi avversi e modalità di impiego.

™ indica un marchio commerciale del gruppo Abbott.

© 2017 Abbott. Tutti i diritti riservati.

23243-SJM-CRM-0814-0002(1)e(3)c IT | Solo per uso fuori dagli Stati Uniti.

