



# Una guía de paciente para la CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR MERLIN@HOME™

## Uso del adaptador para teléfono móvil



**SU NUEVO DISPOSITIVO DE ABBOTT SE MONITORIZARÁ VÍA REMOTA EN LA CONSULTA DE SU MÉDICO CON EL TRANSMISOR MERLIN@HOME.**

**YA SE HA CONFIGURADO SU TRANSMISOR PARA COMUNICARSE CON EL DISPOSITIVO Y ESTÁ LISTO PARA SU USO.**

### 1. EN CASA

Cuando le den el alta hospitalaria, llévese el transmisor a casa. Ya se ha configurado o "vinculado" a su nuevo dispositivo.




### 2. COLOCACIÓN

Debe colocar el transmisor a un máximo de 1,8 m (6 pies) de la cama. La parte delantera del transmisor debe apuntar hacia usted y estar al mismo nivel que el pecho.




### 3. CONEXIÓN

Conecte el cable USB al puerto USB situado en el lado derecho del transmisor. Compruebe que el adaptador para teléfono móvil está conectado al cable USB como se muestra en la imagen.

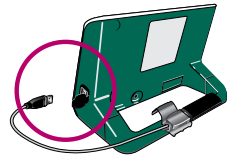

### 4. ALIMENTACIÓN

Enchufe el transmisor a una toma de alimentación. Tardará unos minutos en iniciarse y conectarse a la red móvil local la primera vez que lo conecte. Mientras tanto, es normal ver es normal ver que las luces de debajo de los iconos se enciendan de una en una.

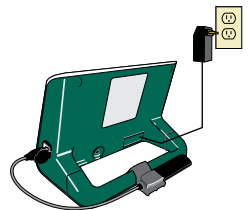

### 5. LISTO PARA SU USO

La luz verde indica que el transmisor está listo para enviar datos a la consulta de su médico. La luz verde se encuentra en la parte inferior derecha del dispositivo y debe estar encendida siempre. No desenchufe el transmisor en ningún momento.



**SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO  
CON EL SERVICIO TÉCNICO DE ABBOTT:**

**1-877-MY MERLIN (1-877-696-3754)**

# PREGUNTAS FRECUENTES

## P. ¿EL TRANSMISOR LEE SIEMPRE MI DISPOSITIVO?

R. No. El dispositivo graba y almacena todos los datos del corazón. El transmisor enviará información segura a la consulta de su médico de manera rutinaria, normalmente cada tres meses. También realiza una revisión rápida del dispositivo todas las noches y envía información únicamente si detecta un incidente (según el criterio definido por su médico).

## P. ¿QUÉ TIPO DE DATOS SE TRANSMITEN?

R. La información que se envía a la consulta es la misma que se recopila en las visitas a la consulta. Esta información se utiliza para evaluar su tratamiento médico.

## P. ¿QUÉ DEBO HACER SI MI TRANSMISOR EMPIEZA A EMITIR UN PITIDO O SI LOS ICONOS EMPIEZAN A PARPADEAR?

R. Aunque es poco frecuente, su transmisor puede emitir pitidos. El pitido no está relacionado con el funcionamiento del dispositivo, normalmente significa que el transmisor tiene problemas de conexión. Su dispositivo de Abbott no se verá afectado por ningún error o fallo técnico en el transmisor. Para detener el pitido del transmisor, pulse y suelte el botón blanco situado en la parte delantera del transmisor. Intentará conectarse de nuevo más tarde. Si el pitido continúa, desenchufe el transmisor y póngase en contacto con el servicio técnico de Abbott.

## P. ¿PUEDE INTERFERIR EL TRANSMISOR MERLIN@HOME CON OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE TENGA EN CASA?

R. El transmisor no debería interferir con la mayoría de los dispositivos electrónicos que tenga en casa.

## P. ¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO UN BUEN SERVICIO MÓVIL EN MI ZONA?

R. Es raro que no pueda conectarse a una red móvil. Si el adaptador para teléfono móvil proporcionado no funciona en su zona, existen dos opciones adicionales: Wifi o teléfono fijo. Si no puede conectarse a la red móvil, póngase en contacto con la consulta de su médico para hablar sobre las opciones de conexión.

## P. ¿QUÉ OCURRE SI SE VA LA LUZ?

R. Un apagón no debería causarle problemas a su transmisor. Si se va la luz, el transmisor no podrá enviar información. Déjelo enchufado y se reiniciará automáticamente cuando regrese la luz. No es necesario que desenchufe el transmisor o lo reinicie manualmente.

## P. ¿CÓMO SÉ SI MI TRANSMISOR MERLIN@HOME FUNCIONA?

R. La luz verde de la parte delantera del transmisor indica que está encendido. Aunque en la consulta de su médico no se comprueba diariamente la conexión, el servicio técnico de Abbott o el médico pueden confirmar que el transmisor está conectado y que envía datos con periodicidad.

## P. ¿NECESITO LLEVARME EL TRANSMISOR MERLIN@HOME CUANDO VIAJE?

R. Se recomienda habitualmente llevar el transmisor solo cuando viaje o esté fuera de casa durante un tiempo prolongado. Consulte con su médico para obtener recomendaciones específicas. Si el médico recomienda que no se lleve el transmisor, déjelo enchufado en casa. Este leerá la información de su dispositivo cuando vuelva.

## P. ¿PUEDE MI MÉDICO HACER CAMBIOS EN MI DISPOSITIVO A TRAVÉS DEL TRANSMISOR MERLIN@HOME?

R. El transmisor Merlin@home no permite hacer cambios remotos en los ajustes del dispositivo.

### ADVERTENCIA

- Esto no es un sistema de emergencia.
- En caso de emergencia, el transmisor no sustituye a ningún reconocimiento médico.
- Si se produce un problema médico o una urgencia, informe inmediatamente a su médico o pida asistencia médica.

**Nota:** Este folleto no sustituye al manual del paciente del fabricante que se proporciona con cada dispositivo.

#### Abbott

One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117 EE. UU.  
Tel.: 1 651 756 2000  
ArrhythmiaAnswers.com  
St. Jude Medical es ahora Abbott.

#### Solo para uso bajo prescripción médica

**Resumen:** Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las instrucciones de uso para ver la lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas e indicaciones de uso.

<sup>™</sup> indica que se trata de una marca comercial del grupo de empresas Abbott.

<sup>‡</sup> indica que se trata de una marca comercial de terceros, propiedad del respectivo propietario.

© 2018 Abbott. Reservados todos los derechos.

37707-MAT-2001980 v.1 | Elemento aprobado para dentro y fuera de los EE. UU.

