

POUR RESTER CONNECTÉ

à l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™, réglez votre smartphone sur les paramètres suivants :

 = Paramètres iPhone[‡]

 = Paramètres Android[‡]

 Bluetooth®, données mobiles/Wi-Fi [‡]	 Bluetooth®, services de localisation et données mobiles/Wi-Fi [‡]	ACTIVÉ
 Actualisation de l'application en arrière-plan	 Utilisation des données en arrière-plan	ACTIVÉ
 Mise à jour automatique des applications	 Mise à jour automatique des applications	ACTIVÉ
 Taille de police STANDARD	 Taille de police NORMALE	ACTIVÉ
 Mode économie d'énergie	 Mode économie d'énergie	DÉSACTIVÉ
 Suppression des applications non utilisées	 Optimisation de la batterie pour l'application « Confirm Rx™ »	DÉSACTIVÉ

Pour en savoir plus sur votre moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™, contactez le support technique Abbott.

Veillez vous munir des informations suivantes lors de votre appel :

Numéro de série du moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ _____

Nom du centre médical qui effectue votre suivi _____

Marque et modèle du smartphone _____

CONNECTÉE
MONITEUR POUR
CONFIRMABLE
RÉSEAU
RAPIDEMENT
ET
SÉCURITÉ



CONSEILS RAPIDES

Abbott
L-3 Esplanade du Foncet, 92130 Issy-les-Moulineaux, 01 41 46 54 05
abbott.com

SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT

Note : avant toute utilisation de ces dispositifs, lire intégralement le mode d'emploi contenant la liste des indications, contre-indications, avertissements, précautions et complications potentielles, ainsi que les instructions d'utilisation.

Indications : le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ est indiqué pour la surveillance et l'évaluation diagnostique des patients éprouvant des symptômes inexpliqués tels que des étourdissements, palpitations, douleurs thoraciques, syncopes et essoufflements, ainsi que chez les patients présentant des facteurs de risques pour des arythmies cardiaques. Il est également indiqué pour les patients ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic de fibrillation auriculaire ou susceptibles d'en présenter une. Le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ n'a pas été testé spécifiquement pour une utilisation pédiatrique.

Contre-indications : il n'y a pas de contre-indication connue à l'implantation du moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. Cependant, la pathologie particulière du patient déterminera s'il peut ou non tolérer un dispositif chroniquement implanté en sous-cutané.

Événements indésirables : les événements indésirables possibles associés au dispositif sont les suivants (par ordre alphabétique) : croissance excessive des tissus fibreux, érosion, extrusion, formation d'hématomes ou de kystes, formation d'une chéloïde, hémorragie, infection, lésion nerveuse chronique, migration du dispositif, réaction allergique.

Consulter le manuel d'utilisation pour connaître le détail des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et événements indésirables potentiels.

Recommandations supplémentaires : les médecins doivent se connecter au système de télécardiologie Merlin.net™ pour voir les données transmises par le moniteur cardiaque Confirm Rx™ de leurs patients. Sur le système Merlin.net™, ils peuvent configurer la fréquence de transmission et activer ou désactiver différentes fonctions de l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ de leurs patients. L'examen des données transmises dépend du médecin et ne se fait pas nécessairement dès leur réception par le système.

Limitations : les patients peuvent utiliser l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ sur leur propre appareil mobile Apple® ou Android® pour transmettre les données de leur moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. Pour cela, l'appareil mobile doit être en marche, l'application doit être installée, la communication sans fil Bluetooth® doit être activée et une connexion de données par réseau mobile ou Wi-Fi® doit être disponible. L'application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ apporte une surveillance périodique du patient selon les réglages effectués par le médecin. Si la transmission échoue, les données sont de nouveau envoyées. Cependant, plusieurs facteurs internes et externes peuvent entraver, retarder ou empêcher l'acquisition des données du moniteur cardiaque et leur transmission au médecin de la manière voulue. Ces opérations dépendent notamment de l'environnement du patient, du fonctionnement des services de données, du système d'exploitation et des réglages de l'appareil mobile, de la capacité mémoire du moniteur cardiaque, de l'environnement du centre médical, des changements de calendrier ou de configuration et du traitement des données.

Un transmetteur mobile Abbott est disponible pour les patients dont l'appareil mobile n'est pas compatible.

Le symbole ™ indique une marque du groupe Abbott.

Le symbole ® indique une marque appartenant à un tiers.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

© 2019 Abbott. Tous droits réservés.

SJM-C-FM-0519-0134a | Document approuvé pour une utilisation aux États-Unis et hors des États-Unis.

Application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application mobile, contactez l'assistance technique de soins à distance d'Abbott :

FRANCE

Horaires d'ouverture de l'assistance

Lundi - Vendredi,

09h00 - 17h00

0 800 000 565

Pour toute question d'ordre médical, contactez directement votre centre médical.