

治療ガイド

担当医師の方へ

本「治療ガイド」には、XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントを用いた治療について患者さまにご理解いただきたい以下の重要事項が記載されています。

治療・治療後の注意点について患者さまのご理解を深めるために本「治療ガイド」をご利用ください。

また、別途配布しております「薬剤溶出ステント手帳」を患者さまにお渡しください。

患者さまに留置されるXIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントについて

- メリットとデメリット
- 留置後の注意事項

抗血小板薬服用に関する注意

- 抗血小板薬服用の重要性
- 血液検査の重要性
- 出血を伴う治療に関する注意
- 患者さまにお渡しする手帳等

患者さまに留置りゅうちされる サイエンス XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントについて

メリットとデメリット

メリット

サイエンス XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントは、金属ステントと比べて血管の治療したところが再び狭くなりやすく、再治療が必要になる可能性が低くなります。

デメリット

サイエンス XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントを冠動脈かんだうみゃくに留置りゅうちした場合、ステントに血栓けっせん（血のかたまり）が付着することを防ぐためにお薬こうけっしょうばんやく（抗血小板薬）を医師の指示する期間服用する必要があるふくようがあります。

抗血小板薬こうけっしょうばんやくの服用に伴い重い副作用が起こる場合があります。このため、医師の判断により血液検査を実施する場合があります。

留置りゅうち後の注意事項

サイエンス XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントには、血管の治療したところが再び狭くなることを防ぐ目的でエベロリムスというお薬とふが塗布されています。

このお薬による妊婦もしくは胎児に対する影響は不明であるため、以下のことをお守りください。

- ステント留置りゅうち後1年間は、男女とも効果的な避妊を行ってください。
- 授乳を行わないでください。

抗血小板薬服用に関する注意

抗血小板薬服用の重要性

サイエンス™ XIENCE™ シリーズ薬剤溶出ステントを留置された患者さまには、こうけっしょうばんやく抗血小板薬が処方されます。このお薬（こうけっしょうばんやく抗血小板薬）は、ステントのまわりに血栓（血のかたまり）をできにくくします。血栓ができてしまうと冠動脈の血流が悪くなり、胸痛が起きたり、狭心症や心筋梗塞が再発したりする可能性があります。

ふくよう患者さまの判断により、お薬の服用を止めないでください。

血液検査の重要性

こうけっしょうばんやく抗血小板薬の服用に伴い重い副作用が起こる場合があります。このため、医師の判断により血液検査を実施する場合があります。

血液検査を指示された場合は、重い副作用を未然に防ぐために必ず来院して血液検査を受けてください。

転院等により、血液検査を受けていない場合には、患者さまから医師に申し出てください。

薬剤溶出ステント手帳記載のこうけっしょうばんやく抗血小板薬の副作用についてもしっかりと目を通し、体調変化を感じた際には、どんなことでも直ぐに医師に申し出てください。

出血を伴う治療に関する注意

こうけっしょうばんやく抗血小板薬を服用すると、ふくよう出血した際に血が止まりにくくなります。内視鏡検査・抜歯・手術など出血を伴う治療を受ける際は、事前に担当医師へ薬剤溶出ステントを留置していること、こうけっしょうばんやく及びふくよう抗血小板薬を服用中であることを申し出てください。

抗血小板薬服用に関する注意

患者さまにお渡しする手帳等

患者さまにお渡しする手帳、カード、シールは、^{こうけっしょうばんやく ふくよう}抗血小板薬を服用していることを知らせるものです。
これら「カード」と「手帳」は、医師や歯科医師、薬剤師にも大切な情報となります。

こうけっしょうばんやくふくよう

抗血小板薬服用カード

抗血小板薬服用カード

心臓疾患治療のため、XIENCE™シリーズ薬剤溶出ステントを留置しています。これにともない、ステントに血栓がつくことを防止するために抗血小板薬を服用しています。やむを得ず服用を中止する場合は、カード裏面の担当医師にご相談下さい。



このカードは常に持ち歩いてください。
また、他院や他診療科、歯科、薬局にかかる際には提示をしてください。



薬剤溶出ステント手帳

この手帳には、日常注意すべき点などが記載されています。内容をご確認ください。

XIENCE™シリーズ薬剤溶出ステント

薬剤溶出ステント手帳

XIENCE Skypoint™
XIENCE Sierra™
XIENCE Alpine™
XIENCE Xpedition™



「カード」「手帳」は常に持ち歩いてください。

転院する場合、もしくは他院や他診療科・歯科・薬局にかかる際には、必ず提示してください。

こうけっしょうばんやくふくよう

「抗血小板薬服用中」シール

こうけっしょうばんやく ふくよう

シールは、患者さまが抗血小板薬を服用しているということを知らせるためのものです。患者さまがかかる他院・他診療科・歯科の診察券にこのシールを貼ってください。診察券以外にも、自分を証明するものに貼ることをおすすめいたします。

(カード、シールは手帳ケースの裏面に入っています)



製造販売業者

アボットメディカルジャパン合同会社

本社：〒105-7115 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター

お問い合わせ：VASCULAR事業部

〒108-6304 東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー 4F

Tel (03)4560-0780 Fax (03)4560-0781

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies. Information contained herein for use in Japan ONLY.

www.cardiovascular.abbott/jp

©2025 Abbott. All rights reserved. (MAT-2504142 v1.0)

